

# Alvatech® Wipes

## Technisches Datenblatt

### Alvatech® Wipes – Alkoholische Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Flächendesinfektionstücher
- Wiederverschließbare Verpackung, Tücher einzeln entnehmbar
- Aldehyd- und phenolfrei
- Enthält erfrischende Duftstoffe
- Geeignet zur Desinfektion von kleinen und mittelgroßen Flächen
- Gute Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Flächen, wie z.B. Acrylglas oder Polycarbonatglas)

#### 1. Anwendungsgebiete:

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

#### 2. Anwendung:

Zu desinfizierende Flächen gleichmäßig und bis zur vollständigen Benetzung abwischen.

Die empfohlenen Einwirkzeiten sollten eingehalten werden.

#### 3. Ausführungen:

Produkt	Gebinde	Inhalt	Größe	PZN	EAN
Alvatech® Wipes	Softpack	80 Tücher	20 x 20 cm	16764544	8682560472774

#### 4. Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Bakterizid gem. EN 13727 (inkl. MRSA & VRE):	konzentriert 30 Sek.
Tuberkulozid gem. EN 14348:	konzentriert 1 Min.
Levurozid gem. EN 13624:	konzentriert 30 Sek.
Viruzid (Adeno, Polio, Noro) gem. EN 14476:	konzentriert 5 Min.

#### 5. Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 40 g, 2-Propanol 9,5 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

Sonstige Bestandteile: n-Butanol 2 g, Korrosionshemmstoffe.

#### 6. Zulassung:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidverordnung.

Reg.-Nr.: N-93303

#### 7. Chemisch-physikalische Daten:

Dichte: 0,9 g/cm<sup>3</sup> (bei 20 °C)

pH-Wert: 5,5 - 5,7

#### 8. Haltbarkeit:

 2 Jahre

#### Standzeit:

Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

#### 9. Stand der Informationen: 07/2020


#### 10. Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

Alvatech® Wipes vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Gefahr

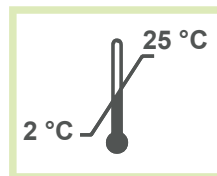

**N-93303**

#### Hersteller:



Kuzey Saglik Ürünleri ve  
Kimya Sanayi A. .  
Gersan San. Sitesi 2310 sok. No: 47  
Yenimahalle-Ankara/TURKIYE  
Phone: +90 312 256 66 96  
www.kuzey saglik.com.tr

#### Exklusivvertrieb:



HOZ MEDI WERK  
Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
Am Sülzenbrückener Wege 3  
D-99334 Amt Wachsenburg  
Telefon: +49 (0)3 62 02 8 81-0  
Telefax: +49 (0)3 62 02 8 81-35  
E-Mail: [info@hoz-medi-werk.de](mailto:info@hoz-medi-werk.de)  
Internet: [www.hoz-medi-werk.de](http://www.hoz-medi-werk.de)