

Alvatech Spray®

Technisches Datenblatt

Alvatech Spray – Alkoholhaltiges Flächendesinfektionsmittel

- Alkoholhaltige Sprüh- und Wischdesinfektion
- Gebrauchsfertige Lösung
- Aldehyd- und phenolfrei
- Enthält erfrischende Duftstoffe
- Gute Benetzung, schnelle und fleckenfreie Abtrocknung

1. Anwendungsgebiete:

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und nicht-invasiven Medizinprodukten.

2. Anwendung:

Zu desinfizierende Flächen gleichmäßig und bis zur vollständigen Benetzung einsprühen oder auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen. Die empfohlene Einwirkzeit beträgt 1 bis 5 Minuten.

3. Ausführungen:

Lieferform	PZN	EAN-Nummer	Pack/VE
500 ml Spenderflasche	15423321	8680789009436	20

4. Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA & VRE):	konzentriert 30 Sek.
Tuberkulozid	konzentriert 60 Sek.
Levurozid, Fungizid	konzentriert 30 Sek.
Viruzid (Adeno, Polio, Noro) gem. EN 14476	konzentriert 5 Min.

5. Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 40 g, 2-Propanol 9,5 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

Sonstige Bestandteile: n-Butanol 2 g, Korrosionshemmstoffe.

6. Zulassung:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidverordnung.

Reg.-Nr.: N-75585

7. Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Dichte: 0,908 g/cm³ +/- 0,05 g/cm³ (bei 20 °C)

pH-Wert: 7,0 +/- 1

8. Haltbarkeit:

 2 Jahre

Standzeit:

Nach Anbruch der Flasche innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. Stand der Informationen: 03/2020


10. Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augen-reizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Behälter dicht ver-schlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen-schutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

Alvatech Spray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Gefahr

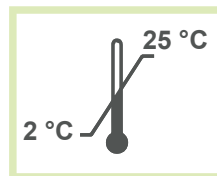

N-75585

CE 1984

Hersteller:



Kuzey Saglik Ürünleri ve
Kimya Sanayi A. .
Gersan San. Sitesi 2310 sok. No: 47
Yenimahalle-Ankara/TURKIYE
Phone: +90 312 256 66 96
www.kuzey saglik.com.tr

Exklusivvertrieb:



HOZ MEDI WERK
Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Am Sülzenbrückener Wege 3
D-99334 Amt Wachsenburg
Telefon: +49 (0)3 62 02 8 81-0
Telefax: +49 (0)3 62 02 8 81-35
E-Mail: info@hoz-medi-werk.de
Internet: www.hoz-medi-werk.de